

FICHE TECHNIQUE



LINGETTES NETTOYANTES DESINFECTANTES MEDWIPES 18x20cm

Réf. **HL110** – Paquet de 100 lingettes

USAGES ET PROPRIETES :

Les lingettes nettoyantes désinfectantes Stericid Medwipes sont conçues pour le nettoyage et la désinfection des :

- Surfaces dures non poreuses en milieu médical, collectivités ou lieux accueillant du public (poignées de portes, tables, chaises, toilettes...).
- Surfaces dures non poreuses des dispositifs médicaux non critiques (lits médicalisés, monitoring, connectiques...).

Le petit matériel et les dispositifs médicaux non-immérgeables et non invasifs peuvent être mis en contact, après rinçage, avec des muqueuses.

- ✓ Lingettes en fibres biodégradables
- ✓ Emballage recyclable
- ✓ Formule sans alcool
- ✓ Sans parfum

Propriétés microbiologiques à 20°C :

BACTÉRICIDE	EN1276*, EN13727**, EN13697**, EN16615**	5 min
LEVURICIDE	EN1650*, EN13624**, EN13697**, EN16615**	5 min
ACTIF SUR VIRUS	EN14476** sur Vaccinia, Herpès, PRV, BVDV, Coronavirus, HIV, Rotavirus, Adenovirus, Norovirus. EN16777** sur Vaccina, Norovirus, Adenovirus.	5 min

MODE D'EMPLOI :

Produit prêt à l'emploi à usage unique. Soulever le couvercle et retirer l'étiquette autocollante. Sortir une lingette du paquet. Passer 3 lingettes par m² de surface à nettoyer et désinfecter. Laisser agir 5 minutes. Ne pas rincer, sauf si le produit est en contact avec les denrées alimentaires ou aliments pour animaux.

CARACTERISTIQUES :

Couleur : Transparente / blanche
Parfum : Sans parfum
pH : 5,9 – 7,9 (lingettes imprégnées)
Dimensions d'une lingette : 18 x 20 cm

CONDITIONNEMENT :

Paquet de 100 lingettes
GENCOD produit : 361524000054
Carton de 12 paquets
Palette de 50 cartons

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Éviter le rejet dans l'environnement. Aucun pictogramme de danger. En cas d'incident, contacter le CAP le plus proche (01.45.42.59.59). Produit destiné aux professionnels.

INFOS COMPLEMENTAIRES :

Durée d'utilisation après ouverture : 3 mois. Consignes de tri : Emballage complet à mettre dans la poubelle de tri (sachet, capot, étiquette). Produit biocide TP2 et TP4 (désinfectants pour les surfaces, matériaux équipements et le mobilier avec et sans contact direct avec les denrées alimentaires ou aliments pour animaux). Actif: Chlorure de Didécylidiméthylammonium (n° CAS: 7173-51-5 : 0.29%).